


Venofix[®] Safety Sicherheits- Perfusionsbesteck

Venenpunktionsbestecke mit Sicherheitsmechanismus

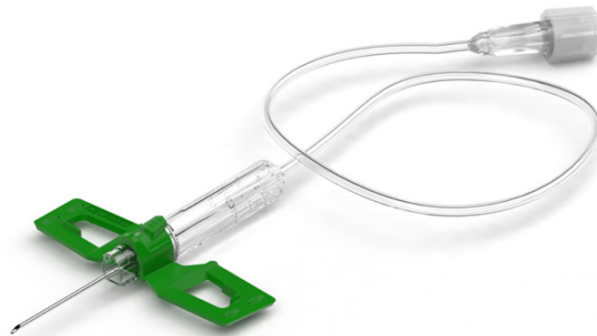

Auf einen Blick

- Venofix Safety Sicherheits-Venenpunktionskanüle
- Mit Sicherheitsmechanismus zur Verhütung von Nadelstichverletzungen
- Aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl
- Mikrosilikonisierter Präzisionsschliff
- Hoher Anwendungskomfort, einfache Handhabung
- Große, flexible Flügel mit farblicher Größenkennzeichnung
- Punktieren wie gewohnt
- Einfacher Aktivierungsmechanismus
- Hörbarer Sicherheitsmechanismus-Klick
- Flexibler, transparenter, knickstabiler Schlauch
- Luer-Lock-Ansatz
- Schlauch-Länge: 30 cm
- 1 Packung mit 50 Stück

Produktinformationen

Das **Venofix Safety ist ein Perfusionsbesteck** aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl mit mikrosilikonisiertem Präzisionsschliff. Der Sicherheitsmechanismus ist leicht zu aktivieren und schützt den Anwender zuverlässig vor Nadelstichverletzungen. Bei dem Sicherheitsmechanismus handelt es sich um ein Röhrchen, das per Click über die Kanüle geschoben wird und nach dem Einrasten irreversibel dort verbleibt.

Die Fixationsflügel des Perfusionsbestecks sind mit einer farblichen Größenkennzeichnung versehen. Das Sicherheits-Perfusionsbesteck hat einen knickstabilen Schlauch mit guter Rückstellfähigkeit. Venofix Safety ist sicherheitstechnisch unbedenklich mit allen gängigen Druckinfusionsapparaten verwendbar.



Sicherheits-Mechanismus

Drücken – ziehen – „Klick!“. Der Safety-Mechanismus der Venofix Sicherheits-Kanülen wird aktiviert, wenn man beide Seiten des Gehäuses zusammendrückt und zurückzieht, bis ein Klicken zu hören ist. So einfach wird maximaler Schutz ermöglicht. Dieser Sicherheitsmechanismus ist dann auch irreversibel.

Hintergrund dieses ausgeklügelten Systems zur Venenpunktion ist eine Vorschrift, die seit August 2007 die Verwendung sicherer Instrumente bei der Punktion von Patienten mit möglichem negativem HIV, HBC oder HCV-Status vorgibt.

Beim BBraun Sicherheitsvenenpunktions-Besteck wurde die vorgegebene Technologie erweitert. Dadurch lässt sich der Sicherheitsmechanismus schnell und noch zuverlässiger aktivieren, indem man den Punktionsbereich desinfiziert und die Venofix Safety darauf fixiert wird. Dann müssen nur noch die erwähnten Schritte „drücken – ziehen – Klick!“ erfolgen. Das Sicherheits-Venenpunktions-Set kann übrigens wie gewohnt im Abwurf entsorgt werden.

Produkteigenschaften

Beschreibung

- Punktionskanüle: Aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl
- Mikrosilikonisierter Präzisionsschliff
- Fixationsflügel mit farblicher Größenkennzeichnung
- Schlauch: Länge 30cm, Flexibel, Transparent
- Lock-Ansatz
- Verschlusskonus Lock

Sicherheitseigenschaften

- Keine Veränderung der Punktioneigenschaften
- Einfacher Aktivierungsmechanismus
- Hörbarer Sicherheitsmechanismus "Klick"

Anwendungsbereiche

Produktrichtlinien und Hinweise

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
G19: 1,10 x 19 mm, creme	100617	4056500-01	05112608	50 Stck.	27,50 €	PB	
G21: 0,80 x 19 mm, grün	84313	4656520-01	02481529	50 Stck.	27,50 €	PB	
G23: 0,65 x 19 mm, blau	84607	4056510-01	02481512	50 Stck.	27,50 €	PB	
G25: 0,50 x 19 mm, orange	84608	4056500-01	02481506	50 Stck.	27,50 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: