

# Söhngen® Thermo-Kompresse zur Kälte- oder Wärmebehandlung

Thermo-Kompresse Kalt/Warm Kompresse  
Dauerkompresse, gut anmodellierbar, bis  $-30^{\circ}\text{C}$   
flexibel. Im Gefrierfach vorkühlen, im  
Wasserbad bis  $+60^{\circ}\text{C}$  vorheizen.



**SÖHNGEN®**



## Auf einen Blick

### Produktinformationen

Im Sportbereich findet die Kalt-/Warmkomresse schon lange Anwendung. Kalt-/Warmkomresse zur Speicherung und Abgabe je nach Bedarf von Wärme oder Kälte. Komresse mit blauer, umweltfreundlicher Gelfüllung für die therapiegerechte Anwendung in der Kälte- und Wärmebehandlung, bei gleichmässiger Kälte- oder Wärmeabgabe. Bei Prellungen, Quetschungen, Zerrungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Verbrennungen einsetzbar. Vor Verwendung muss die Komresse vorgewärmt bzw. vorgekühlt werden. Enthält umweltverträgliches nicht-toxisches Gel. Einfach im Gefrierfach aufbewahren oder im Wasserbad bis 80 °C erhitzen. Mehrfach wiederverwendbar, langlebig.

### Produkteigenschaften

### Anwendungsbereiche

Kalt angewendet bei akuten Entzündungen von Gelenken und Muskeln, bei stumpfen Verletzungen, Schwellungen und Blutergüssen, bei Insektenstichen, bei Zahnschmerzen.

Für den sofortigen Einsatz empfiehlt sich eine Aufbewahrung im Kühlschrank. Die Kompresse ist 2 Stunden nach Kühlung zur Anwendung bereit. Warm angewendet bei Verspannungen, Muskelkater, Rückenschmerzen, Menstruationsbeschwerden.

### Produktrichtlinien und Hinweise

### Produktzusammensetzung

**Füllmaterial:**

Wasser, Propylenglycol, Verdicker, Natronlauge; Konservierungsmittel: Kombination aus Chlormethyl-/Methylisothiazolon (CMI/MI) und N-/ O-Formalen, Farbstoff

**Material:**

Polyamid / Polyethylen

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
klein 8 x 13 cm	88954	1012035	00000000	1 Stck.	1,95 €	PB	
mittel 13 x 14 cm	88955	1012036	00000000	1 Stck.	3,25 €	PB	
groß 15 x 28 cm	88956	1012040	00000000	1 Stck.	5,50 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: