

Absauganlagenendesinfektion

Desinfektion und Reinigung fu?r Absauganlagen und Amalgamabscheider ✓ Verpackungseinheit = 2 Liter PE-Flasche



Auf einen Blick

- für Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider
- aldehyd- und phenolfrei
- extrem schaumarm
- nicht mit anderen Präparaten mischen
- wirkt bakterizid und fungizid
- Kennzeichnung CE0124 Klasse IIa / MD 0108
- UN-Nr. 3082

Produktinformationen

Unigloves Absauganlagen-Desinfektion ist ein hochwirksames Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für moderne Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider und sorgt für hygienische Sicherheit im Praxisbetrieb. Unigloves Absauganlagen-Desinfektion ist aldehyd- und phenolfrei und wirkt auf Basis von quarthaltigen Ammoniumverbindungen, alkalischen Reinigungskomponenten, Komplexbildnern und Entschäumern. Durch das tägliche Absaugen organischer und anorganischer Substanzen besteht die Gefahr, dass sich diese in den Schläuchen oder Filtern der Absauganlage absetzen und Infektionsquellen für Zahnarzt und Personal darstellen. Alle Komponenten des Produktes bewirken eine schaumfreie Pflege mit einer hohen Reinigungsleistung. Auch hartnäckige Ablagerungen an schwer zugänglichen Stellen werden beseitigt. Ein technisch und hygienisch einwandfreier Betrieb der Absauganlagen kann trotz hoher Keim- und Schmutzbelastung (z. B. Amalgamreste, Dentinstaub, Eiweiß, Speichel) gewährleistet werden.

Unigloves Absauganlagen-Desinfektion entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen gem. TRGS 525/540.

- Verbesserte Rezeptur für optimale Hygienequalität der Absauganlagen
- breiteres Wirkungsspektrum, sowie praxisfreundliche und schnellere Einwirkzeiten
- getestet nach den neuesten Prüfstandards der Europäischen Normen, VAH, und DVV-Leitlinie
- geprüfte Materialverträglichkeit für diverse Absauganlagensysteme
- Pflegende Bestandteile zum Erhalt und Schonung der Systeme
- sparsamer Gebrauch, das Konzentrat von 10 l reicht für ca. 500 Anwendungen
- deutlich geringerer Schaumbildung

Produkteigenschaften

Anwendungsbereiche

Unigloves Absauganlagen-Desinfektion ist geeignet für die tägliche Desinfektion, Reinigung und Pflege aller Absauganlagen. Die regelmäßige Verwendung von Unigloves Absauganlagen-Desinfektion gewährleistet eine hygienisch einwandfreie Absauganlage, sowie störungsfreien Betrieb ohne störende Schaumbildung.

Produktrichtlinien und Hinweise

Persönlicher Schutz:

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Arbeitsschutzkleidung. Bei unzureichender Belüftung, hohen Konzentrationen oder Aerosol- oder Nebelbildung Atemschutz tragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet sind nach EN 374 geprüfte Chemikalienschutzhandschuhe. Art des Materials: Butylkautschuk, FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk. Generelle Lüftung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Lagerungshinweis:

Produkt Haltbarkeit: 2 Jahre. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Nach dem Öffnen ist das Produkt innerhalb der auf dem Etikett angegebenen Verwendbarkeit/ Haltbarkeit zu verbrauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Materialverträglichkeit

Materialverträglichkeit nach EN ISO 175:2015 + DIN 50905:1987 nachgewiesen für:

Metalle Kupfer, Messing, rostfreier Stahl, Aluminium*

Kunststoffe PVC Polycarbonat*, Plexiglas, Polysulfon (Makrolon)

Keramik Keramik

Silikone Gummi (Latex, EPDM)

*Vorsicht: längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Aluminium und Polycarbonat vermeiden!

Produktzusammensetzung

In 100 g Konzentrat sind enthalten:

13,2 g 2- Aminoethanol, 4 g Benzalkoniumchlorid,

5 g 2- Propanol, Komplexbildner, Farbstoff

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
2 Liter-Flasche	90-4402	90-4402	00000000	2 l	11,60 €	PB	
5 Liter-Kanister	90-4405	90-4405	00000000	5 l	22,80 €	PB	
10 Liter-Kanister	90-4410	90-4410	00000000	10 l	43,10 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: