

BODE X-WIPES - trockene Vliesrollen -

BODE X-Wipes höhere Qualität ✓ 60g/m² ✓

Universell einsetzbares

Vliestuchspendersystem ✓ für alle flüssigen

BODE Flächendesinfektionsmittel ✓ besonders

sparsamer und hygienischer Einmalgebrauch

✓ Tuchformat: 20x38cm ✓ Verpackungseinheit

= 6 Rollen á 90 Tücher





Auf einen Blick

- **Bode X-Wipes Vliestücher zum Einmalgebrauch**
- Maße des einzelnen Vliestuches: 38 x 20 cm
- Durch Perforation getrennt
- Reißfest, Saugfähig, Fusselfrei
- Ohne Adsorptionseffekte
- Zur Verwendung mit allen flüssigen BODE Flächen-Desinfektionsmitteln
- Standzeit nach Tränkung: 28 Tage
- **Rollengröße: 90 Tücher**

Produktinformationen

BODE X-Wipes Vliesrollen bestehen aus saugfähigem PET Vlies (60 g/m²). Das hochwertige Vliestuchmaterial aus PET gewährleistet, im Gegensatz zu anderen Vliestuchmaterialien, eine optimale Wirkstoffabgabe an die zu desinfizierende Fläche. Die gute Vliestuchqualität sorgt ebenfalls dafür, dass die Tücher auch im feuchten bzw. nassen Zustand ihre Reißfestigkeit behalten. Das rechteckige Tuchformat von 200 x 380 mm eignet sich optimal zum Falten und garantiert eine besonders gute Flächenbenetzung. Je nach Bedarf sind Vliesrollen mit einem Umfang von 90, 40 oder 30 Einzeltüchern erhältlich.



Produkteigenschaften

Anwendungsbereiche

Zur desinfizierenden Flächenreinigung in vielen Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und Lebensmittelbetrieben, in denen besonderes Augenmerk auf Wirtschaftlichkeit, Hygiene und Anwenderkomfort gelegt wird.

Produktrichtlinien und Hinweise

Anwendung:

Entsprechend der eingesetzten Vliesrolle wird der Tuchspender mit 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung (90'er Rolle), 1,5 Liter (40'er Rolle) oder 750 ml (30'er Rolle in BODE X-Wipes Dose) befüllt.

Bei Einsatz von Anwendungslösungen, die aus einem Konzentrat angesetzt werden, sollte mindestens die VAH Einsatzkonzentration mit einer Einwirkzeit von einer Stunde (oder kürzer) gewählt werden. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes zu beachten. Alkoholische Schnell-Desinfektionsmittel sind gebrauchsfertig und werden unverdünnt eingesetzt.

Standzeit:

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen. (Ausnahme Bodedex forte: 7 Tage Standzeit Korsolex basic: 7 Tage Standzeit)

Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	70740	980556	03538510	6 Rolle	49,15 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: