

Absauganlagen sanitation B. Braun Tiutol dent

**Für die Sanitation von zahnärztlichen
Absauganlagen und wasserführenden
Leitungen in Behandlungseinheiten ✓
Beschreibung -Desinfektionsmittelkonzentrat
mit hoher Reinigungskraft ✓ Für zahnärztliche
Absauganlagen und Amalgamabscheider ✓
Wirkt gegen Bakterien inkl. TbB, Pilze -Viruzid
inkl. HBV, HCV, HIV -Besitzt eine hohe
Materialverträglichkeit und wirkt
entschäumend -3 %ige
Anwendungskonzentration, d.h. 30 ml auf 1 l
kaltes Wasser ✓ Anwendungsbereich
Sanitation von Absauganlagen und
Amalgamabscheidern ✓ Verpackungseinheit =
5 Liter Kanister**



B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

Auf einen Blick

- **Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher Reinigungskraft**
- **Für zahnärztliche Absauganlagen und Amalgamabscheider**
- Wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB), Pilze
- Viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- Besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entschäumend
- 3 %ige Anwendungskonzentration, d.h. 30 ml auf 1 l kaltes Wasser

Produktinformationen

Produkteigenschaften

- flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat mit hoher Reinigungskraft
- phenolfrei
- aldehydfrei
- für zahnärztliche Absauganlagen und Amalgamabscheider
- wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB) und Pilze; viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV)
- besitzt eine hohe Materialverträglichkeit und wirkt entschäumend

Anwendungsbereiche

Sanitation von Absauganlagen und Amalgamabscheidern

Produktrichtlinien und Hinweise

Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Tiutol ® dent wird 3%ig, d. h. 30 ml auf 1 Liter kaltes Wasser, eingesetzt und u?ber die Ansaugschl?uche der Anlage zugefu?hrt. Am besten t?glich mittags und abends anwenden.

Reinigung nach der Behandlung:

Jeweils nach der Behandlung sind der Spraynebelschlauch sowie gegebenenfalls der Speichelzieher- und der Chirurgeschlauch mit kaltem Wasser nachzuspu?len. Hierzu schalten Sie einfach die Spu?lung des Mundspu?lbeckens ein und saugen das flie?ende Wasser u?ber die oben aufgef?hrten Schlauchsysteme zwecks Reinigung der Zentrifugenkammer, der Luft-Wasser-Separation, der Siebe sowie der Fu?hler ab. Sanitation von Absauganlagen und Amalgamabscheidern:

Die Sanitationsma?nahmen sind arbeitst?glich mittags und/oder abends durchzuf?hren.

a) Herstellung der Anwendungsl?sung

Zur Herstellung der Anwendungsl?sung von Tiutol. dent dosieren Sie mittels Dosierbecher oder Dosierpumpe 30 ml Tiutol. dent auf einen Liter kaltes Wasser. Diese Anwendungsl?sung fu?hren Sie der Absauganlage und dem Amalgamabscheider mittels eines geeigneten Applikationssystems (z. B. „Schlu?rfbecher“) u?ber die jeweils eingesetzten Ansaugschl.uche zu. Mit verbliebenen Restmengen bzw. mit einer zus?tzlich angesetzten Gebrauchsverdu?nnung anschlie?end mit einer Bu?rste die Speischale reinigen.

b) Siebpflege

Bei Verwendung von Tiutol ® dent ist es ausreichend, die Ansaugsiebe, das Schalensieb der Speischale und bei vorhandenem Amalgamabscheider die Filterschublade mehrmals w?chentlich auf Verschmutzung zu kontrollieren. Gegebenenfalls sind diese nach fachgerechter Entsorgung des Inhalts zu reinigen. Zur desinfizierenden Reinigung verschmutzter Siebe hat es sich bew. hrt, diese mindestens eine Stunde in eine 3%ige Anwendungsl?sung von Tiutol ® dent einzulegen. Auf dem Kanister aufgebrachte Sicherheitshinweise sind zu beachten und die Anweisungen der Unfallverhu?tungsvorschrift, die beim Umgang mit nicht fu?r die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen wasserdichter Schutzhandschuhe vorschreibt, sind zu befolgen.

Zus?tzliche Hinweise:

Zur Sanitation der Absauganlage inklusive Amalgamabscheider reicht allein Tiutol ® dent aus, sodass Sie keine weiteren Desinfektions- und Reinigungsmittel ben?tigen. Die zus?tzliche Verwendung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln neben Tiutol ® dent kann vielmehr zu Korrosionssch?den an der Anlage und zu Schaumbildung fu?hren. Machen Sie daher bitte auch Ihre Raumpflegekr?fte darauf aufmerksam, dass keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, die au?erhalb der Behandlungseinheit Verwendung finden, u?ber die Speischale entsorgt werden. Tiutol. dent nach Ablauf des auf dem Kanister angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Vorsicht:

Nicht zusammen mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verwenden, da gef?hrliche Gase freigesetzt werden k?nnen. Entwickelt bei Beru?hrung mit S?ure giftige Gase. Verursacht schwere Verl?tzungen. Bei Beru?hrung mit den Augen gru?ndlich mit Wasser abspu?len und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Nicht mischen mit sauren oder s?urehaltigen Mitteln. Darf nicht in die H?nde von Kindern gelangen.

Indikation:

verd?nnt anwenden (3%ig)

Produktzusammensetzung

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:

Aktivchlor 3,9 g, Natronlauge, spezielle Stabilisatoren, Korrosionsschutz, Wasser

Hinweis:

Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können.

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	51129	9325425	06166776	5 l	39,00 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: