

Meliseptol rapid - Alkoholische Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertige, alkoholische
Schnelldesinfektion ✓

Schnelldesinfektionsmittel mit frischem
Geruch ✓ Als Wisch- oder Sprühdeseinfektion
verwendbar ✓ Aldehydfrei und frei von
Alkylaminen ✓ Verschiedene Ausführungen ✓
Verpackungseinheit = 1 Dosierflasche á 250 ml
mit Sprühkopf



Auf einen Blick

- **Gebrauchsfertiges Flächendesinfektionsmittel**
- **Zum Versprühen und zum Wischen geeignet**
- Vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- Schnelldesinfektionsmittel mit frischem Geruch
- DGHM-/ VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Flächendesinfektionsmittel für Oberflächen von Medizinprodukten, wie z.B. Behandlungsstühle, Arbeitsflächen und OP-Ausstattungen
- Besonders schnell wirksam: 1 Min. DGHM/ VAH bzw. TbB in 30 Sek

Produktinformationen

Meliseptol Rapid ist eine alkoholische Flächendesinfektion mit breitem Wirkspektrum, die zum Sprühen oder Wischen verwendet werden kann. Durch ihr umfassendes Wirkspektrum und die kurze Einwirkzeit eignet sich hervorragend das Meliseptol rapid Flächendesinfektionsmittel ebenso zur Schnelldesinfektion zwischen zwei Behandlungen wie zur generellen Flächendesinfektion nach Arbeitsende. Meliseptol ist je nach Bedarf in verschiedenen Größen erhältlich.

Wesentliche Produktmerkmale:

- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Als Wisch- oder Sprühdesinfektion verwendbar
- Frei von Alkylaminen und Aldehyden

Produkteigenschaften

- gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zum Versprühen oder Wischen
- vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- frischer Geruch
- für Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Behandlungsstühlen, Arbeitsflächen und OP-Ausstattungen
- umfassendes Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid und fungizid (inkl. Schimmelpilze). Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) und viruzid (inkl. Noroviren).
- Einwirkzeit nur 1 Minute (gemäß DGHM/VAH und begrenzt viruzid)
- Einwirkzeit Viruzidie: 10 Minuten
- DGHM-/VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste aufgeführt

Anwendungsbereiche

Produktrichtlinien und Hinweise

Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Meliseptol rapid aus der Dosierflasche auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und das Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkoholempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol rapid prüfen.

Hinweise:

- Führt in der praktischen Anwendung nicht zu unerwünschten Hautreaktionen durch hautreizende oder sensibilisierende Wirkung (Dermatologisches Fachgutachten, Dermatest Münster, 07/2002)
- Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden
- Alkoholempfindliche Materialien vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol rapid prüfen

Wichtiger Hinweis:

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung:

entzündlich. Nicht in offene Flamme sprühen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Gefahr ernster Augenschäden (nach Augenkontakt sorgfältig mit viel Wasser ausspülen). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 31 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m².

Produktzusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

Propan-1-ol 50,0 g,
Didecyldimethylammoniumchlorid 0,075 g sowie Duft- und Hilfsstoffe

Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien:

< 5 % nicht ionische Tenside, Parfum

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
250 ml-Sprühflasche (mit Sprühkopf)	44276	18564	01264592	250 ml	3,50 €	PB	
250 ml Sprühflasche (ohne Sprühkopf)	45653	18564	01264534	250 ml	3,30 €	PB	
1 Liter-Flasche (Spenderflasche)	102299	19108	00241413	1 l	11,33 €	PB	
5 Liter-Kanister	40371	18567	01264600	5 l	27,00 €	PB	
1 Liter-Flasche (ohne Sprühkopf)	42168	18565	01264586	1 l	6,96 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: