

Trockene Vliestücher Dr. Schumacher Eco Wipes Desotex

Eco Wipes Vliestücher trocken ✓ zur Tränkung
mit allen Flächendesinfektionsmitteln ✓
wiederbefüllbares Spendersystem ✓ gute
Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche ✓ Bei
Verwendung von Desinfektionsmitteln können
die Tücher nach Tränkung über einen Zeitraum
von 28 Tagen verwendet werden





Auf einen Blick

- **Dr. Schumacher Eco Wipes**
- **Zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln**
- **Wiederbefüllbares Spendersystem**
- Gute Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
- Sehr wirtschaftlich
- Maße: 30 x 32 cm
- Verpackungseinheit = 6 Rollen Tücher á 100 Tücher

Produktinformationen

ECO WIPES ist ein Mehrweg-Vliestuchspendersystem zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. ECO WIPES bestehen aus einem Mehrweg-Vliestuchspender sowie entsprechenden Vliestuchrollen zum Nachfüllen. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden und bieten somit eine hohe Flexibilität.

Wesentliche Produktmerkmale:

- Zur Befüllung mit ECO WIPES Vliestüchern und Tränkung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln

Produkteigenschaften

Anwendungsbereiche

Wiederbefüllbares Vliestuchspendersystem zur Tränkung, hygienischer Aufbewahrung und Anwendung mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar oder Flächen aller Art.

Produktrichtlinien und Hinweise

Anwendung:

Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln. Flächen mit den getränkten ECO WIPES bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Anwendungsbeschreibung:

Befüllung: Deckel des Vliestuchspenders entfernen und mit der Außenseite auf der Arbeitsfläche ablegen.

Trockene Vliestuchrolle

aus der Verpackung entnehmen und in den Vliestuchspender einsetzen (Alternativ: Bereits vorgetränkte Tücher mit dem Beuteleinsetzen). Desinfektionsmittellösung langsam und spiralförmig über die Vliestuchrolle in den Spender füllen. Erstes Tuch aus der Mitte der Vliestuchrolle herausziehen und den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen. Vliestuchspender fest verschließen. Beim Verschließen der Entnahmeöffnung darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist. Beigefügtes Deckeletikett mit den Ansatzinformationen vollständig ausfüllen und auf dem Deckel anbringen. Nach 30 Minuten sind die Tücher einsatzbereit. Das erste Tuch verwerfen.

Vor jeder Wiederbefüllung eines ECO WIPES Mehrweg-Vliestuchspenders ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion erforderlich. Es wird empfohlen vor der Aufbereitung den Vliestuchspender einer visuellen Kontrolle zu unterziehen. Bei Abnutzungserscheinungen sind Deckel/Vliestuchspender abzutauschen.

Befüllung:



Reinigung

Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungstuch gründlich reinigen. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen.



Desinfektion

Innenseiten und Rand des Spenders mit dem Desinfektionstuch gründlich abwischen. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen.



Produktzusammensetzung

Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
	89835	00-915-REW10006-01	00000000	6 Rolle	42,20 €	PB	

Publikationen

Ihre Bestellinformationen

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

Stempel

Datum / Unterschrift

Anmerkungen: