

# Schnelldesinfektion B.Braun Meliseptol Foam pure Desinfektionsschaum

## Desinfektionsschaum für alkoholempfindliche Flächen





### Auf einen Blick

- Schaum zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- sehr gute Materialverträglichkeit auch bei
- alkoholempfindlichen Materialien
- vollkommen aldehydfrei und frei von Alkylaminen
- parfümfrei
- dermatologisch getestet
- kurze Einwirkzeiten
- **DGHM-VAH-zertifiziert, IHO-Viruzidie-Liste**

### Produktinformationen

**Meliseptol Foam pure** ist ein sanftes Schnelldesinfektionsmittel, das für Medizinprodukte und kleine Flächen verwendet werden kann. Durch die Schaumform wird die Bildung von Aerosolen vermieden und die Atemwege geschont. Meliseptol Foam pure hat eine besonders gute Materialverträglichkeit und kann sogar bei Vaginalsonden, Ultraschallköpfen und Acrylglas eingesetzt werden. Meliseptol Foam pure Flächendesinfektion kann weiterhin zur Hospitalismusprophylaxe in der Arztpraxis und im Pflegebereich eingesetzt werden. Die Anwendung von **Meliseptol Foam pure** Flächendesinfektion ist einfach und schnell: Fläche mit Meliseptol Foam pure vollständig benetzen und mit einem Tuch verreiben

### Produkteigenschaften

- Schaum zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und kleinen Flächen
- gute Materialverträglichkeit auch bei alkoholempfindlichen Materialien wie z. B. Acrylglas, Ultraschallköpfe- und -sonden (inkl. Vaginalsonden), Pumpengehäuse (Valox), Untersuchungsliegen
- keine Aerosolbildung beim Versprühen
- parfümfrei – unauffälliger Geruch
- wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, ist begrenzt viruzid
- (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Rota-, Polyoma- und aviäre
- Influenzaviren
- DGHM/VAH – gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- dermatologische Prüfung „sehr gut“

## Anwendungsbereiche

## Produktrichtlinien und Hinweise

### Hinweise:

Flächen vollständig mit Meliseptol® Foam pure benetzen und Desinfektionsschaum mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

## Produktzusammensetzung

### 100 g Lösung enthalten:

Propan-1-ol 17 g, Didecyldimethylammoniumchlorid 0,23 g, nicht ionische Tenside. Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: < 5 % nicht ionische Tenside. Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Augen-/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### Bestellinformationen

Typ	ArtNr	HerstellerNr	PZN	VE	Preis	Verordnungshinweis	Bestellmenge
5 Liter	86876		07314552	5 l	32,00 €	PB	
750 ml-Sprühflasche	86856	19796	07314546	750 ml	9,50 €	PB	

### Publikationen

**Ihre Bestellinformationen**

Ihre Kundennummer	
Firma / Praxis	
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
Mail	

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Anmerkungen: