



EURONDA

Die neuen Eurosonic® Ultraschallgeräte 4D - 3D - Micro

INHALT

| | |
|--|----|
| Der neue Standard | 05 |
| Eurosonic® 4D. Gut, ist nicht gut genug. | 07 |
| • EINSATZ DES DECKELS | 15 |
| • DIREKTE UND INDIREKTE REINIGUNG | 15 |
| Effektiv und einfach. | 09 |
| Eurosonic® 3D. Die solide Wahl. | 11 |
| Eurosonic® Micro. Schlichtheit, die überzeugt. | 13 |
| Reinigungsprogramme. | 14 |
| Reinigungsphasen. | 14 |
| Technische Details. | 15 |
| Technische Daten. | 15 |

Für Sie, weil Sie es lieben, sich auch bei der Arbeit
mit schönen Dingen zu umgeben.
Für Sie, weil Ihnen Sicherheit über alles geht.
Für Sie, weil Sie gut gemachte Dinge lieben.
Für Sie, weil Sie nur das Beste wollen...





Neuer Standard in der Ultraschallreinigung.

Die Eurosonic® Ultraschallreiniger 4D - 3D und Micro sind extrem leistungsfähig und anwenderfreundlich. Die Bedienung ist intuitiv und einfach. Das neu entwickelte Kontrollrad "E-Controller" steuert alle Funktionen. Beleuchtete Symbole machen die Auswahl des richtigen Reinigungsprogramms spielend leicht.





EURONDA

10' 20' 30' 40' 50' 60'

eurononda 40

high-performance ultrasonic cleaner

Icons: power, timer, temperature, spray, wash, rinse, dry, stop, pause, on/off



Eurosonic® 4D. Gut, ist nicht gut genug.


Das Eurosonic® 4D erzielt optimale Reinigungsergebnisse in vier Phasen. Für eine effektive Säuberung wird jede Phase in Abhängigkeit des gewählten Programms digital gesteuert. Die großzügige Edelstahlwanne fasst 3,5 Liter. Über den integrierten Ablaufhahn wird sie schnell und einfach entleert. Der formstabile und halbtransparente Deckel unterstreicht das elegante Design. Seine besondere Konstruktion reduziert das Abtropfen von Flüssigkeit. Folgendes Zubehör ist für das Eurosonic® 4D erhältlich:
Perforierter Einhängkorb aus Edelstahl, Becherhalter für 3 Becher, Becherhalter für 1 Becher, Glasbecher mit 600 ml Fassungsvermögen.



Fokus

- EINSATZ DES DECKELS
- DIREKTE UND INDIREKTE REINIGUNG

Seite 15

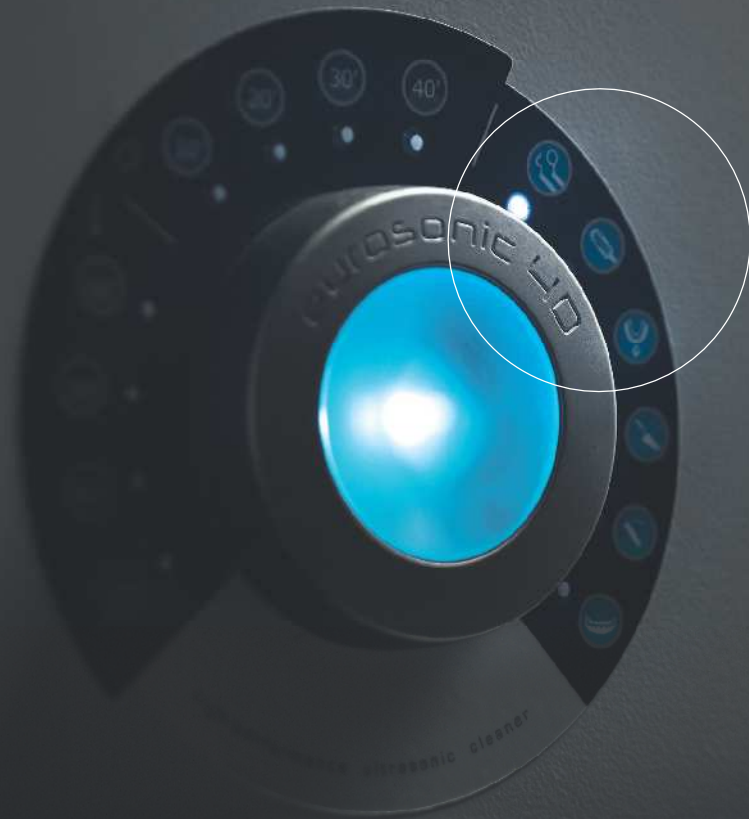

Effektiv und einfach.

Wählen sie mit dem neu entwickelten Kontrollrad "E-Controller" eins von sechs Automatikprogrammen. Alle Programme sind für verschiedene Reinigungszwecke bereits optimiert und steuern den Reinigungsprozess in vier Phasen: Zunächst wird überschüssiges Gas aus der Reinigungslösung entfernt. Phase zwei beseitigt grobe Verunreinigungen. Es folgt eine intensive Feinreinigung. In Phase vier werden die Obeflächen final behandelt. Für individuelle Anwendungen stellen Sie Reinigungszeit und Reinigungsdauer einfach nach Ihren Wünschen ein. Es stehen Zeiten von 10 bis 40 Minuten und Temperaturen von 30 bis 60 °C zur Verfügung.




Herzstück des neuen Eurosonic® 4D ist der E-Controller. Damit haben Sie alle Einstellungen mit einem Dreh sicher im Griff. Das innovative Lichtsystem, bekannt aus anderen Euronda-Geräten, signalisiert den Reinigungsprozess optisch. Sie erfassen den Reinigungsstatus mit einem Blick.



EURONDA

EUROSONIC 30

ULTRASONIC CLEANER

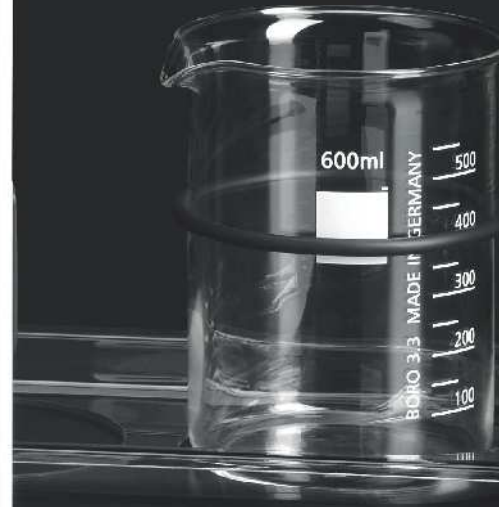

600ml

500
400
300
200
100

BORO 3.3 MADE IN GERMANY

Eurosonic® 3D. Die solide Wahl.

Im Eurosonic® 3D kommt die vielfach bewährte Euronda Sweep-Mode-Technologie zum Einsatz. Mittels digitaler Steuerung werden permanente Frequenzwechsel erzeugt. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Der E-Controller am Eurosonic® 3D unterstützt ebenfalls das E-Light Lichtsystem. Die Edelstahlwanne hat eine Kapazität von drei Litern. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei konstant 60 °C zur Verfügung.

Folgendes Zubehör ist für das Eurosonic® 3D erhältlich:

Unverformbarer, halbtransparenter Kunststoffdeckel, perforierter Einhängkorb aus Edelstahl, Becherhalter für 2 Becher, Glasbecher mit 600 ml Fassungsvermögen.



EURONDA

eurosonic micro

ultrasonic cleaner

Eurosonic® Micro. Schlichtheit, die überzeugt.

Das kleinste Ultraschallgerät der Eurosonic®-Serie überzeugt durch kompakte Abmessungen, ergonomisches Design und einfachste Handhabung. Einfach einschalten – fertig. Der Reinigungszyklus ist auf 10 Minuten bei 30 °C fest eingestellt. Eurosonic® Micro - die optimale Wahl für die schnelle Reinigung von kleinen Gegenständen.
Lieferung inklusive transparentem Kunststoffdeckel.

REINIGUNGSPROGRAMME



1 - INSTRUMENTE

20 min

40 °C



2 - BOHRER UND FRÄSER

10 min

40 °C



3 - ABDRUCKLÖFFEL

40 min

60 °C



4 - ZEMENTRESTE

10 min

30 °C



5 - GIPSRESTE

30 min

60 °C




6 - PROTHESEN

40 min

60 °C


REINIGUNGSPHASEN

ENTGASUNGS-PHASE

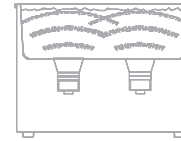


IN DER REINIGUNGSLÖSUNG ENTHALTENE GASE WERDEN ELIMINIERT. DIE ULTRASCHALLWELLEN WERDEN NICHT DURCH LUFTEINSCHLÜSSE ABGELENKT, TREFFEN UNGEHINDERT AUF DAS REINIGUNGSGUT UND KÖNNEN IHRE GANZE REINIGUNGSKRAFT ENTFALTEN.

BOOST-PHASE

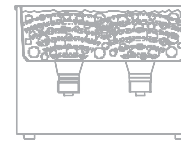


DIE BOOST-PHASE ERZEUGT INTENSIVE SCHALLWELLEN IN SCHNELLER FOLGE. SIE LÖSEN GROBE VERUNREINIGUNGEN VON DEN INSTRUMENTEN AB.

NORMAL-PHASE

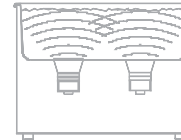

DIE ULTRASCHALLWELLEN ERZEUGEN EINE VIELZAHL VON MIKROBLÄSCHEN IN DER REINIGUNGSLÖSUNG. BEIM AUFTREFFEN AUF DAS REINIGUNGSGUT IMPLODIEREN DIE BLÄSCHEN UND LÖSEN DARAN HAFTENDEN SCHMUTZ AB. DIESES PRINZIP (KAVITATIONSVERFAHREN) SORGT FÜR EINE BESONDERS FEINE REINIGUNG. EINE ERHÖHUNG DER TEMPERATUR DES ULTRASCHALLBADES UND DER EINSATZ VON REINIGUNGSMITTELN UNTERSTÜTZEN DIESEN PROZESS.

SWEEP-MODE-PHASE

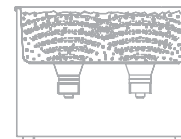


ULTRASCHALLWELLEN MIT WECHSELNDEN FREQUENZEN GEWÄHRLEISTEN EINE GLEICHBLEIBEND INTENSIVE UND GRÜNDLICHE ENDREINIGUNG ALLER OBERFLÄCHEN UND HOHLRÄUME.

TECHNISCHE DETAILS



➔ EINSATZ DES DECKELS

EIN KLEINES ZUBEHÖR MIT GROSSER WIRKUNG: DER DECKEL ER VERHINDERT DAS AUSTRETEN VON AEROSOLPARTIKELN UND SPRITZWASSER UND UNTERSTÜTZT DAS SCHNELLE AUFHEIZEN DER FLÜSSIGKEIT IN DER ULTRASCHALLWANNE. DA ER AUS EINEM SPEZIELLEN MATERIAL GEFERTIGT WIRD, REDUZIERT ER SEHR WIRKSAM DAS NIVEAU DES ARBEITSGERÄUSCHES. DIE NEU ENTWICKELTE FORM VERHINDERT DAS ABTROPFEN VON FLÜSSIGKEITEN, WELCHE SICH IM BETRIEB AM DECKEL NIEDERSCHLAGEN.

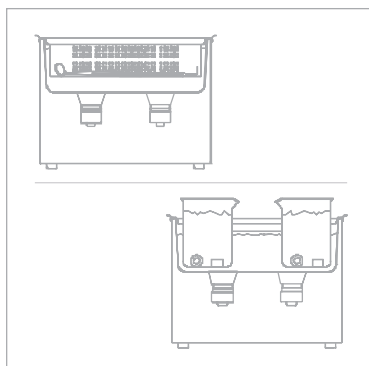

➔ DIREKTE UND INDIREKTE METHODE

DIREKTE METHODE: EINFACH DIE FLÜSSIGKEIT, GGF. MIT EINEM REINIGUNGSZUSATZ, IN DIE ULTRASCHALLWANNE EINFÜLLEN. INSTRUMENTE ODER ZU REINIGENDES MATERIAL IN DEN KORB LEGEN, DIESEN DANN INS GERÄT EINHÄNGEN. ZUM SCHLUSS NOCH DEN MITGELIEFERTEN DECKEL AUFLEGEN.

INDIREKTE METHODE: EIGNET SICH BESONDERS FÜR SEHR KLEINE GEGENSTÄNDE WIE BOHRER ODER FRÄSER, ABER AUCH FÜR ZAHNPROTHESEN ODER KIEFERORTHOPÄDISCHE ZAHNKLAMMERN. DIE FLÜSSIGKEIT, GGF. MIT EINEM REINIGUNGSZUSATZ, IN DIE ULTRASCHALLWANNE EINFÜLLEN. BEFÜLLEN SIE EBENFALLS DIE ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlichen BECHER UND STELLEN DIESE IN DIE BEREITS GEFÜLLTE ULTRASCHALLWANNE. ES KÖNNEN MEHRERE BECHER - JE NACH GERÄTEMODELL - EINGESETZT WERDEN, WELCHE MIT UNTERSCHIEDLICHEN FLÜSSIGKEITEN UND MATERIALIEN GEFÜLLT WERDEN KÖNNEN.

TECHNISCHE DATEN

EUROSONIC® 4D

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| AUSSENABMESSUNGEN | 320 x 240 x 170 (+65) mm (LxHxB) |
| WANNENGRÖSSE | 300 x 100 x 150 mm (LxHxB) |
| WANNENVOLUMEN | 3,5 l |
| GEWICHT | 4,5 kg |
| BETRIEBSSPANNUNG | 220-230 V - 50/60 Hz |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 300 W |

EUROSONIC® 3D

| | |
|--------------------|----------------------------|
| AUSSENABMESSUNGEN | 260 x 220 x 156 mm (LxHxB) |
| WANNENGRÖSSE | 238 x 100 x 135 mm (LxHxB) |
| WANNENVOLUMEN | 3 l |
| GEWICHT | 3,3 kg |
| BETRIEBSSPANNUNG | 230 V - 50/60 Hz |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 280 W |


EUROSONIC® MICRO

| | |
|--------------------|----------------------------|
| AUSSENABMESSUNGEN | 235 x 130 x 170 mm (LxHxB) |
| WANNENGRÖSSE | 150 x 65 x 83 mm (LxHxB) |
| WANNENVOLUMEN | 0,5 l |
| GEWICHT | 1 kg |
| BETRIEBSSPANNUNG | 230 V - 50/60 Hz |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 40 W |

ZERTIFIZIERUNG: Ultraschallwanne: 2006/95/EC - 2004/108/EC - Unternehmen: ISO 9001 - ISO 13485



Headquarters: EURONDA SPA
36030 Montebelluno Pievevicino (Vicenza) Italy
Via dell'Artigianato, 7
tel. +39 0445 329811 - fax +39 0445 865246
info@euronda.com - www.euronda.it

Deutschland: EURONDA DEUTSCHLAND GMBH
43341 Altenberge
Siemensstraße, 46
tel. +49 2505 9389 0 - fax +49 2505 9389 29
info@euronda.de - www.euronda.de  EurondaDeutschland

España: EURONDA IBÉRICA 2012 S.L.
03009 Barcelona
Número de atención al cliente: 900 10 20 34
info@euronda.es - www.euronda.es

France: EURONDA FRANCE EUHL
95660 Champagne-sur-Oise
Z.A. du Paradis - 1, rue Lavoisier
tél. +33 1 30 34 50 27 - fax +33 1 30 34 46 02
info@euronda.fr - www.euronda.fr

Russia: Protoco ZAO
196128, St. Petersburg
5/2 Varshavskaya str.
tel./fax +7 (812) 635 88 90
info@protocodent.ru - www.protocodent.ru